



FlexPath™ Trace

Solución de trazabilidad guiada por el operador para Anatomía Patológica



Una solución única e innovadora que permite realizar un seguimiento de las muestras histológicas a lo largo de todo el proceso desde el lugar de obtención hasta el diagnóstico y el almacenamiento.

¿Qué es **FlexPath™ Trace**?

FlexPath™ Trace es una solución de trazabilidad guiada por el operador que garantiza una cadena de custodia completa, desde la obtención de la muestra hasta el diagnóstico final y el almacenamiento de la muestra histológica. Al guiar al operador a través de cada paso del proceso que lleva al diagnóstico histológico, FlexPath™ Trace garantiza la gestión de muestras individuales y la aplicación de procedimientos estandarizados. Ofrece una integración rápida y fluida de todos los dispositivos disponibles en el laboratorio. Además, FlexPath™ Trace es completamente integrable y escalable con diferentes HIS y AP LIS.


¿Por qué **FlexPath™ Trace**?

Los datos recopilados por FlexPath™ Trace permiten redefinir los protocolos de procesamiento, las técnicas de tinción avanzadas y las pruebas moleculares con base en los parámetros preanalíticos. No más dudas durante la fase preanalítica, no más asuntos no deseados en su laboratorio: toda la información de la muestra se recopila en unos pocos pasos, desde los tipos de muestra hasta las condiciones de fijación, como el tiempo y la temperatura.

Ventajas

- > Verificación del paciente/de la muestra
- > Trazabilidad completa de las muestras
- > Recopilación de datos
- > Guiado del operador

Puente de datos entre el punto de recogida y el laboratorio

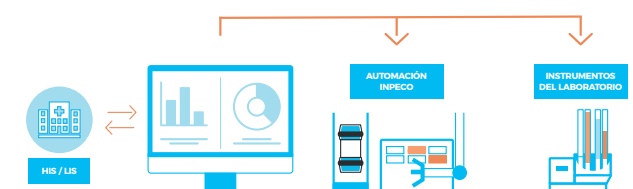

¡NOVEDAD! - Lugar de obtención

Specimen information

Prescripción > Order
Digestive System - Mouth

Identificación del paciente > New identification

Date of collection
17 Nov 2022 15:05

Examination type
Cytologic Histologic

Anatomic site
Mouth

Specimen type
Please provide the specimen type

Procedure

Multiple fragments
Yes No

Number of samples
1

Specimen preservation
Fresh sample Fixative Vacuum

Birth date
20 Feb 1953

Identifier

¡NOVEDAD! - Registro

Después de la obtención de la muestra, se envía una solicitud de laboratorio al área de registro. Esta solicitud crea una lista de pedidos para la estación de registro del laboratorio. De esta forma, el laboratorio puede revisar fácilmente la carga de trabajo prevista y programar todas las actividades diarias en consecuencia. El laboratorio siempre sabe qué muestras se han enviado, cuáles están retrasadas en su trayecto al laboratorio y cuáles aún no se han enviado.

Accessioning

View all orders

1	2	3	4	5	6	7	8
Status	Date of creation	Code	Description	Patient	Medical department	Specimen: serial	Applicant doctor
Quarant	21 Nov 2017 09:35:23	I-2022-000002	Ocular system - eye		General surgery	O 217	John Doctor
Assigned	21 Nov 2017 09:35:23	I-2022-000003	Digestive system - intestine		General surgery	1/1	John Doctor
Assigned	21 Nov 2017 09:35:23	I-2022-000005	Digestive system - intestine		General surgery	1/1	John Doctor
Quarant	21 Nov 2017 09:35:23	I-2022-000006	Integumentary system - ear		General surgery	O 217	John Doctor
Quarant	21 Nov 2017 09:35:25	I-2022-000004	Ocular system - eye		General surgery	O 217	John Doctor
Assigned	21 Nov 2017 09:35:26	I-2022-000007	Ocular system - eye		General surgery	1/1	John Doctor
Assigned	21 Nov 2017 09:35:26	I-2022-000008	Digestive system - mouth		General surgery	1/1	John Doctor
Quarant	21 Nov 2017 09:35:26	I-2022-000009	Digestive system - mouth		General surgery	O 217	John Doctor
Assigned	02 Nov 2022 10:00:02	I-2022-000001	Digestive system - intestine		General surgery	1/1	John Doctor

- Estado de los pedidos
- Fecha de creación del pedido
- Alias de pedido
- Descripción del pedido
- ID del paciente
- Fecha de origen del departamento de pedido
- Estado de entrega del espécimen
- Usuario fuente del pedido

Trazabilidad completa de las muestras histológicas individuales*

Obtención de muestras



- Identificación segura del paciente
- Información sobre la muestra
- Condiciones de la muestra (fresca, fijación, al vacío)
- Tiempo y temperatura
- Creación de lista de pedidos

Tareas del Lab de AP



- Registro, macroscopía, procesamiento, inclusión, microtomía, tinción, almacenamiento, recuperación
- Alertas y mensajes entre diferentes estaciones

Diagnosis



- Tradicional
- Digital

Almacenamiento



- Términos cortos trazados y automatizados
- Términos intermedios trazados y automatizados
- Términos largos trazados y automatizados

* Algunas versiones del software puede que no incluyan todas las funcionalidades

FlexPath™

FlexPath™ de Inpeco es un conjunto de soluciones para la automatización que asegura la completa trazabilidad en Anatomía Patológica, con base en 4 pilares:

- Recolección trazabilidad de datos.
- Integración de instrumentos sin ninguna concesión.
- Automatización de tareas no técnicas.
- Automatización del manejo de las muestras

Los módulos de FlexPath™ consisten en:



FlexPath™ Trace

para una trazabilidad sin concesiones de las muestras



FlexPath™ Blox

para la inclusión automatizada de muestras en parafina



FlexPath™ Move

para el transporte de bloques de parafina



FlexPath™ Store

para almacenamiento automático de bloques de parafina

Inpeco SA

Via Torracchia 26
6883 Novazzano
Suiza
inpeco.com



Código de referencia: FLY-FLP-Trace-2309
Versión n.º: ES04
Septiembre 2023